

医薬品の適正使用に欠かせない情報です。必ずお読みください

—適正使用のお願い—

フタラール消毒液 0.55% 「シオエ」のご使用にあたって

2019年7月
日本新薬株式会社
シオエ製薬株式会社

・消毒後のすすぎを十分に行ってください。

・注意点

- ① 消毒後は多量の水で本剤を十分にすすいでください。
- ② 細孔を有する等の複雑な構造の器具類では、特に注意して十分に消毒後のすすぎを行ってください。

なお、器具類の洗浄・消毒方法については、メーカーの推奨する方法や学会等のガイドライン等を参照してください。

すすぎにあたって

- ・すすぎが十分でない医療器具等を患者さんに使用した場合、アナフィラキシー等の有害事象があらわれるおそれがあります。
- ・フタラール製剤で消毒を行った術中経食道心エコー（TEE）プローブ等の医療器具を使用した患者さんに、口唇・口腔・食道・胃等に着色、粘膜損傷、化学熱傷等の症状があらわれたとの報告がありますので、すすぎを十分に行ってください。

本剤のご使用にあたっては、添付文書（容器）を必ずご覧ください。

以上

製造販売元 **シオエ製薬株式会社**

兵庫県尼崎市潮江3丁目1番11号

販 売 **日本新薬株式会社**

京都市南区吉祥院西ノ庄門口町14